


木津川ダルク・アパリエストは、薬物の問題を抱えた人やその家族を支援するために活動しています。私たちの考えは、合法・違法を問わず薬物を使用してしまうことを、身体やメンタルヘルスの健康問題と捉え、これまで回復の手助けをしてきました。アパリエストは、企業で働く方々の助けになるよう唾液検査キットを販売し、検査結果が陽性の場合には支援をする「D☆Check & Support」を始めました。

### 唾液検査キット使い方説明

使い方が簡単な唾液による簡易薬物検査です。  
約3分の検査時間で6種類の薬物とアルコールを検出できます。  
ラインが出れば陰性、出なければ陽性です。  
※アルコールはカラーチャートをご参照ください。

#### <検出可能薬物>

COC(コカイン)、AMP(アンフェタミン)  
BZO(ベンゾジアゼピン)、OPI(ヘロイン)  
MET(覚せい剤)、THC(大麻)、アルコール

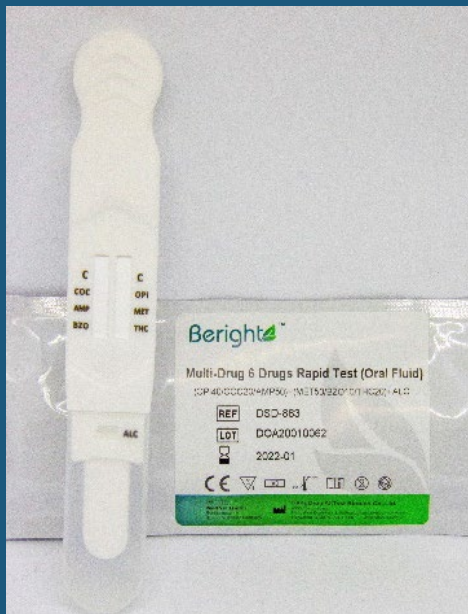


### Beright<sup>TM</sup>

#### 唾液検査キット使用方法


使い方が簡単な唾液による簡易薬物検査です  
約3分の検査時間で同時に6種類の薬物とアルコールを検出できます

ステップ1

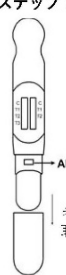


キャップを取り外します

ステップ2

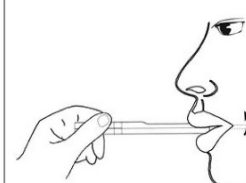


先端を口の中に入れ  
唾液を含ませます

ステップ3



60秒  
舌の下側に置き60秒  
待ちます

ステップ4

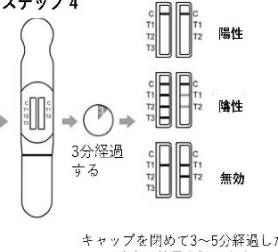

3分経過する  
キャップを閉めて3~5分経過した  
時点で結果を読みます

検出可能薬物：COC(コカイン)、AMP(アンフェタミン)  
BZO(ベンゾジアゼピン)、OPI(ヘロイン)  
MET(覚せい剤)、THC(大麻)、ALC(アルコール)

Alcohol	
NORM.	ABNORM.
NEG.	0.2% (0.02%)
	0.4% (0.04%)
	0.8% (0.08%)
	3.0% (0.30%)

#### <陽性反応が出た際の支援>

- 精神科医療機関の紹介
- 依存症回復支援プログラムの紹介
- 薬物依存症リハビリ施設「ダルク」の紹介
- 薬物事件を専門とする弁護士の紹介
- 個別相談
- 家族支援 など

#### <ご注意！>

違法薬物の使用を確定するものではありません。  
(市販薬や処方薬等で反応する場合があります)  
疾病の診断にもちいるものではありません。